

K-208 D TOALLITAS LIMPIADORAS DESINFECTANTES



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 208 D, son unas toallitas limpiadoras y desinfectantes, precortadas, listas para usar en superficies lisas, utensilios, manos y pequeño material médico no invasivo.

Formulado en base a mezcla de alcoholes no irritantes y tolerancia en la piel. Dermatológicamente probada.

Las toallitas se encuentran impregnadas por una solución que no mancha ni tiñe. Supone un suministro controlador desinfectante sin pre-mezclas ni residuos. Es seguro para la piel, ya que incorpora agentes deterivos de la piel.

Gracias a su envase, es portátil y fácil de transportar.

Eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, así como la mayoría de virus, hongos y microorganismos.

Ensayos microbiológicos:

BACTERICIDA EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14561

FUNGICIDA EN 1275. EM 1650 (sobre candida albicans), EN 13697

LEVURICIDA EN 13624 sobre Candida albicans

VIRUCIDA EN 14476 sobre Herpés simples virus (HSV), Influenza A (H1N1).

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 208 D especialmente diseñado para:

- Apropriadas para desinfectar en una gran variedad de entornos: máquinas, utensilios y equipos potencialmente sensibles, tales como los de producción de alimentos, servicio de comidas, cuidados de la salud, industriales y públicos, equipos de protección personal: mascarillas, cascos, aparatos de respiración, calzado.
Útil en los servicios sanitarios: limpieza de camillas, ambulancias, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Toallita
- Aspecto: Toallita Blanca de 120 x 200 mm
- Color: Blanco
- Olor: Inodoro
- pH: 7.50 ± 0.5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: No relevante

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 208 D posee las siguientes propiedades:

- No produce dermatitis.
- Cumple con CE 0459 aplicable a los dispositivos médicos no invasivos.
- Contiene entre otros componentes: Cloruro de Benzalconio, Trideceth-7, Etanol, Isopropanol.

MODO EMPLEO

Levantar la pestaña y tirar de la toallita hasta la línea auto cortante. Cerrar el envase para evitar la sequedad del resto de las toallitas.

Frotar suavemente las manos con el paño, incidiendo en las zonas donde haya acumulo de suciedad, hasta conseguir unas manos limpias de cualquier residuo.

También puede utilizarse para la limpieza e higienización de las superficies de trabajo. El aclarado es innecesario, a menos que el dispositivo médico deba de estar en contacto con las membranas mucosas.

Tiempo de contacto: 5 minutos (1 minuto para el virus Influenza H1N1)

No requiere secado posterior.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.
- CONSERVESE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

Presentación:

Botes dosificadores de 100 unidades

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com